


Gebruiksaanwijzing voor een Mini power oorstukje



Het inzetten van het maatoorstukje

Probeer het oorstukje met zo weinig mogelijk kracht in het oor te plaatsen. Oefen het inzetten slechts enkele malen achter elkaar. Een zeer dun laagje vaseline of een druppeltje olie kan het inbrengen makkelijker maken, maar zorg ervoor dat de vaseline nooit het geluidskanaal blokkeert. Het linker en rechter maatoorstukje hebben een duidelijk herkenbaar logo aan de voorkant. Het maatstukje met het **rode** logo is voor de rechter kant, het maatstukje voor de linkerkant is voorzien van een **blauw** logo. Lukt het inzetten niet, laat u dan door uw audicien helpen. De audicien kan u leren hoe het maatoorstukje precies geplaatst dient te worden. Op den duur wordt het plaatsen van het oorstukje een automatische handeling.

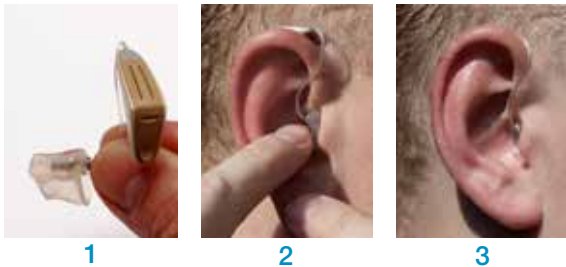

- A** Pak het oorstukje zó vast bij het slangetje, dat de opening van het oorstukje naar het oor wijst. Met het logo naar voren. (foto1)
- B** Plaats het hoortoestel achter de oorschelp en zet het maatoorstukje in de ingang van de gehoorgang. Pak met uw duim en wijsvinger van de andere hand de oorlel vast en duw met uw wijsvinger het oorstukje in de gehoorgang. (foto2)
- C** Druk het oorstukje goed in de gehoorgang. Maar op één manier kan het goed zitten. De eerste keer heeft de audicien u geholpen bij het inzetten. Laat u nogmaals helpen als het niet goed lukt. (foto3)



Regelmatig verwisselen van het aansluitslangetje

Het is van belang dat u verstopping van het slangetje voorkomt. Vocht of oorsmeer in het slangetje kunnen ervoor zorgen dat uw hoortoestel niet of nauwelijks functioneert. Oorsmeer kunt u verwijderen met een oorsmeerhaakje. Vocht kunt u verwijderen met een blaasbalgje. Na verloop van tijd wordt het aansluitslangetje hard. De slangetjes zijn van soepel PVC materiaal. Echter door invloed van UV licht en temperatuurwisselingen kan het slangetje uitharden. Laat daarom het slangetje regelmatig door uw audicien vervangen of vervang zelf het slangetje. Er zijn voorgebogen slangetjes die het zelf wisselen van een slangetje eenvoudig maakt.

Gebruiksaanwijzing voor een Mini power oorstukje

- A** Voordat u het oude slangetje uit het oorstukje trekt kijkt u hoe de stand van het oude slangetje is ten opzichte van het oorstukje. Dan trekt u het oude slangetje uit het oorstukje. (foto 4)
- B** Het nieuwe slangetje wordt met het smalle deel vanaf de buitenkant in het oorstukje gestoken en er doorheen getrokken. (foto 5)
- C** De bocht van het slangetje moet precies aansluiten aan het oorstukje en de stand moet hetzelfde zijn als bij het oude slangetje. (foto 6)
- D** Het oude slangetje kunt u gebruiken om de lengte te bepalen voor de aansluiting met het hoortoestel. Het nieuwe slangetje moet ongeveer 1 mm langer zijn dan het oude slangetje, omdat dat meestal gekrompen is. (foto 7)
- E** Dan knipt u het slangetje af en ook het deel dat aan de onderkant uit het oorstukje steekt. Na het afknippen steekt er een randje van het slangetje uit het oorstukje. Dit kunt u naar binnen duwen. Daarna koppelt u het oorstukje weer aan het hoortoestel. (foto 8)



4



5



6



7



8

Materialen

De mini power oorstukjes zijn gemaakt van siliconen materiaal op basis van polydimethylsiloxan (siliconen materiaal) en worden met de uiterste zorg geproduceerd in ons laboratorium. Ze voldoen aan de eisen 'besluit medische hulpmiddelen'. De gebruikte materialen hebben alle een CE- markering. Over de oorstukjes wordt een coating van nanolak gedaan. Dit is een flexibele lak waaraan op microniveau heel kleine deeltjes zilver zijn toegevoegd. Op grond van zijn gunstige eigenschappen is zilver een ideale werkzame stof met een langdurige antibacteriële werking. Zilver-ionen werken aan de oppervlakte. Er is maar een zeer geringe hoeveelheid zilver nodig om een goede antibacteriële werking te krijgen. Desondanks is het toch mogelijk dat er irritatie optreedt. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Uw audicien kan u hierover voorlichting geven.

Last van irritatie?

Siliconen materialen kunnen een allergische reactie veroorzaken zoals jeuk en 'natte oren'. Bij sterke verkleuring of jeuk in het oor, moet het siliconen oorstukje vernieuwd worden. Het wordt aangeraden dit tussen 1 en 2 jaar te doen. Voor jeukproblemen zijn er speciale oliën. Uw audicien kan u adviseren.

Het reinigen van het mini power oorstukje

Omdat uw siliconen maatoorstukjes in aanraking komen met de huid en oorsmeer, is het van belang dat u uw maatoorstukjes regelmatig reinigt. Hoe vaak de maatoorstukjes gereinigd moeten worden verschilt per persoon en is afhankelijk van de hoeveelheid oorsmeer die het oor produceert. Maar het is aan te raden dit dagelijks te doen. Deze oorstukjes kunnen gereinigd worden met water en zeep en een speciaal desinfectiedoekje. Deze doekjes desinfecteren, maar bevatten geen alcohol. Bij het reinigen met een bruistablet kan het materiaal verbleken. Onder invloed van het oorsmeer zal na enkele maanden tot een jaar het oorstukje bruin verkleuren. Helaas is dit niet te voorkomen. Uw audicien kan u voorlichting geven over desinfectie reinigingsmiddelen en droogboxjes met UV licht die ook bacteriedodend zijn.

Verzorging van uw gehoorgang

Met speciale huidolie kunt u regelmatig uw oren indruppelen om uitdroging van de huid te voorkomen.