


Gebruiksaanwijzing voor het verwisselen van een slangetje in een acryl microschaaltje



Het verwijderen van het oude slangetje

De verbinding tussen de receiver en het paar is een slangetje. Dit slangetje hardt uit in de loop van een paar maanden. Ook is het belangrijk dit regelmatig te vernieuwen omdat er vuil in kan gaan zitten.

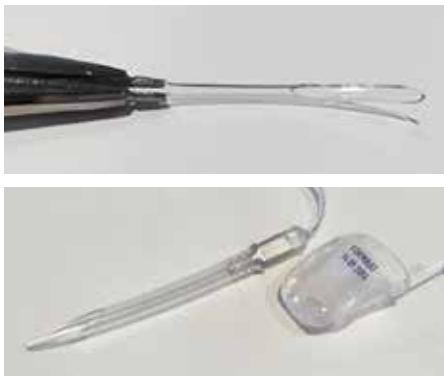

Het inzetten van de receiver in het maatschaaltje.

Bij het maatoorschaaltje wordt een extra flexibel slangetje geleverd met een schuin uiteinde. Met de spreidtang en vriesspray kan het slangetje iets opgerekt worden zodat de receiver van het hoortoestel in het slangetje geplaatst kan worden. Als u dat niet zelf lukt kan uw audicien u helpen.



Hierna kan het slangetje met de receiver door de opening in het maatschaaltje getrokken worden. Als de receiver diep genoeg in het schaalje zit kan het slangetje afgeknipt worden.



Als laatste kan het meegeleverde filtertje de Oticon ProWax in de slang geplaatst worden ter bescherming van de receiver. Met dit grijze gereedschapje kan het filtertje ook weer verwijderd worden voor het wisselen van het slangetje.